

# MediSafe

SAFETY & COMFORT FIRST

SOLO




*sterile single-use safety lancets*  
*sterile Einmalstechhilfen*  
*lancetas asépticas desechables*  
*lancettes jetables, stériles, garantissant la sécurité*  
*lancetas de segurança esteréis de uso único*  
*lancette di sicurezza sterili monouso*  
*jednorazowy nakłuwacz bezpieczny, sterylny*  
*одноразовый безопасный ланцет, стерильный*  
*steril, engångs lansetter*  
*أداة وخذ معقمه ذات الأستخدام الواحد*



NEEDLE  
**23G**  
DIAMETER

## INSTRUCTIONS OF USE

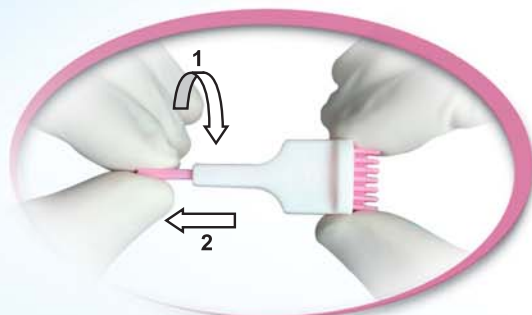

- Twist off the protective cap and pull it straight out.
- Die Sicherheitskappe abdrehen und gerade herausziehen.
- Girar la tapa protectora de la lanceta MediSafe Solo y retirarlo.
- Dévissez le capuchon et retirez le parallèlement à l'axe du piqueur.
- Rode a cápsula de protecção e de seguida retire-a.
- Tenere il dispositivo con le dita come indicato in figura e ruotare la protezione della lancetta fino a staccarla dal dispositivo.
- Ukreć osłonkę ostrza i następnie ją wyciągnij.
- Снять защитный колпачок.
- Vrid först den skyddshättan och drag därefter ut den.
- قم بلوي الغطاء الواقى ثم إسحبه للامام.



- Press the MediSafe Solo body firmly against the puncture site and press the push-button to activate the device.
- Die MediSafe Solo Lanzette fest gegen die entsprechende Einstichstelle ansetzen und den Auslöseknopf betätigen um sie zu aktivieren.
- Colocar la lanceta MediSafe Solo en la zona de prueba y presionar el botón a fin de activar la lanceta.
- Appuyez le MediSafe Solo contre la zone de poncion et presser un bouton pour actionner le dispositif.
- Posicione a lanceta MediSafe Solo de maneira firme no local da picada e pressione o botão para activar o dispositivo.
- Appoggiare MediSafe Solo alla estremità del dito e premere il pulsante per effettuare la puntura.
- Przyłóż nakłuwacz do miejsca nakłucia, a następnie zdecydowanym ruchem naciśnij kciukiem przycisk nakłuwacza.
- Приложите прибор к месту укола и резко нажмите большим пальцем на кнопку.
- Placera lansetten mot sidan av fingerblomman och tryck på utlösaren.
- قم بعملية الوخز بالضغط على زر الغطاء.



- Gently apply intermittent pressure near the puncture site to obtain the required blood volume.
- Um die gewünschte Blutmenge zu erhalten, mit kurzen Unterbrechungen sanft neben die Einstichstelle drücken.
- Seguir apretando de manera suave y discontinua la zona circundante al area de inyección para obtener el volumen adecuado de sangre.
- Effectuez une pression intermittente près de l'endroit piqué pour obtenir le volume de sang nécessaire.
- Aplique cuidadosamente, uma pressão intermitente junto da zona de picada para obter o volume de sangue necessário.
- Messaggiare delicatamente in direzione della puntura per ottenere la quantità di sangue desiderata.
- W celu uzyskania wymaganej ilości krwi delikatnie uciskaj palec w pobliżu miejsca nakłucia.
- Мягко нажимая на место укола, возьмите необходимое количество крови.
- Tryck försiktigt på fingret mot punktionspunkten för att få önskad blodvolym.
- اضغط برفق بجانب مكان الوخز للحصول على كمية الدم المطلوبة.

## TECHNICAL DATA & ORDERING INFORMATION



**MediSafe Solo**  
Cat.No. 7140  
Sales Box 200ct



### 23G

Needle diameter  
Nadeldurchmesser  
Diámetro de aguja  
Diamètre d'aiguille  
Diâmetro da agulha  
Diametro dell'ago  
Średnica igły  
Диаметр иглы  
Nåldiameter  
قطر الأبره

### 2.0 mm

Penetration depth  
Einstichtiefe  
Profundidad  
Profondeur  
Profundidade da penetração  
Profondità della penetrazione  
Głębokość nakłucia  
Глубина укола  
Stickdjup  
عمق الأختراق



for more information go to: <http://www.medisafesolo.com>